



Произведено по заказу  
**ООО «Бейби-Трейд»**  
под торговой маркой **LED Care™**

Россия, 191119, : (812) 600 4 604,  
Санкт-Петербург, : (800) 500 4 604,  
ул. Боровая 32, оф.716 : sales@baby-trade.org

[www.zero-99.ru](http://www.zero-99.ru)

[www.LEDcare.ru](http://www.LEDcare.ru)



**Антибактериальная  
светодиодная соска**

**Инструкция**

## Содержание

Принцип работы	4
Показания к применению	6
Результаты тестирований	10
Подготовка к использованию	12
Способ применения	14
Правила хранения	21
Гарантийные обязательства	23
Свидетельство о приемке	26
Гарантийный талон	27

## Устройство – соска светодиодная

для облучения полости рта и гортани спектром синего цвета у детей раннего возраста для профилактики и лечения легких и среднетяжелых острых форм респираторных заболеваний и ЛОР-заболеваний У-Сед «СВЕТЛЯЧОК-СМ».

- ⋮ *Изделие медицинского назначения,*
- ⋮ *рег. удостоверение № ФСР 2011/12591*
- ⋮ *от 29.12.2011.*

**Произведено по заказу ООО «Бейби-Трейд»  
под торговой маркой LED Care™**



## Принцип действия:

Освещение полости рта и гортани светодиодами (LED) со спектром синего света, обладающим эффективным бактерицидным действием.



## Возрастная категория:

новорожденные (0+) и дети раннего возраста

## Принцип работы:

Соска изготовлена на базе корпуса обычной соски-пустышки, в который вставлен блок со светодиодом (LED), излучающим синий свет. Освещение гортани и полости рта осуществляется через силиконовую оболочку соски-пустышки. Продолжительность работы соски ограничена и составляет не более 300 секунд.

**Устройство выключается автоматически.**

## Показания к применению:

### ● на начальной стадии заболевания:

использование при первых симптомах заболевания (4 – 5 раз в сутки) позволяет **облегчить и практически вдвое сократить сроки течения болезни, значительно снижает риск развития осложнений.**

- ⋮ Эффективность использования соски
- ⋮ тем выше, чем ранее начато лечение.

### ● в текущей стадии заболевания:

позволяет снизить выраженность основных клинических симптомов (насморк, кашель); снижает интоксикацию организма.

**Применение соски значительно уменьшает медикаментозную нагрузку, даёт возможность исключить антибактериальные препараты при лечении среднетяжелых форм ОРВИ.**

## Показания к применению:

- **в профилактических целях:**

в период повышенного риска возникновения заболеваний, рекомендуется в качестве профилактической меры.

- **для облегчения периода прорезывания зубов,**

сопровождающегося катаральными проявлениями.



## Обратите внимание:

**Не рекомендуется использовать соску постоянно, это снизит ее эффективность и вызовет «привыкание» у ребенка.**

Устройство прошло клинические испытания на кафедре Педиатрии Российской Медицинской Академии последипломного образования. (Москва)

## **В результате тестирований установлено:**

- устройство соответствует требованиям, предъявляемым к изделиям, длительно контактирующим со слизистой оболочкой полости рта;

- доза светового излучения стабилизирована и составляет 0,1 Дж. за 1 сеанс, что в 2-3 раза меньше доз, назначаемых детям в широко применяемых физиотерапевтических методиках ультрафиолетового излучения и в 10 раз меньше доз, применяемых в процедурах лазерной терапии в ЛОР-клиниках;
- не обладает местнораздражающим, сенсибилизирующим и токсическим действием;

**Аллергических реакций и непереносимости не обнаружено.**

## Сфера применения:

Соска применяется как в домашних, так и амбулаторных условиях (родильных домах, физиотерапевтических отделениях стационаров для лечения).

## Подготовка к использованию:



Перед первым использованием промойте соску горячей водой с мылом при температуре не выше 60°C.

В последующие использования, при индивидуальной эксплуатации, соску достаточно промывать горячей водой с мылом или другим моющим средством при температуре не выше 60°C.


При необходимости устройство можно дезинфицировать и стерилизовать стандартными методами с использованием раствора перекиси водорода.

**Кипятить изделие недопустимо!**

## Способ применения:

1

Поднесите магнитный ключ к LED-блоку соски, загорится синий светодиод, вмонтированный в устройство.

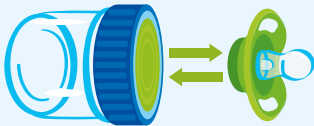



2



Предложите малышу использовать соску, как стандартную соску-пустышку.

В тех случаях, когда ребенок не сосет пустышку, ее следует придерживать во рту ребенка в течение сеанса.



## Способ применения:

-  Длительность одного воздействия составляет от 3 до 6 минут, при этом доза света стабилизирована и составляет 0,1 Дж.
-  Отключение LED-блока происходит автоматически по достижению дозы света 0.1 Дж.

- 
-  После сеанса рекомендуется не оставлять соску для обычного сосания, а вынуть ее, обработать и убрать.
  -  Рекомендуется проводить 4 процедуры в день, за 30 минут до кормления ребенка. Промежуток между процедурами не менее 3-х часов.



## Обратите внимание:

### **Соска предназначена для индивидуального использования.**

*Если ребенок получает только грудное молоко и не умеет сосать соску, то заставлять его специально делать это, даже с лечебной целью, нецелесообразно. Грудное вскармливание в данной ситуации имеет, безусловно, приоритетное значение.*

.....

*В ряде ситуаций, чтобы заинтересовать малыша, соску можно включить до начала сеанса. Однако, чаще всего это отвлекает ребенка, заставляет его вынимать соску изо рта и рассматривать ее, вертя в руках. Лучше сначала дать соску, а потом начать сеанс.*

## В состав комплекта входит:

- 1 соска-пустышка со встроенным LED-блоком
- 2 магнитный ключ для включения соски
- 3 пластиковый контейнер для хранения пустышки
- 4 Инструкция по эксплуатации с паспортом и гарантийным талоном

При утилизации устройства необходимо соблюдать местные требования по утилизации отходов, имеющих в составе химические источники тока.



## Правила хранения:

Соску следует хранить в пластиковом контейнере при комнатной температуре, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

В случае повреждения пустышки, соску следует заменить.

- ⋮ **Запрещается разбирать устройство.**
- ⋮ **Замена батареи невозможна**
- ⋮ **по техническим причинам.**



## Гарантийные обязательства.

Изготовитель обеспечивает гарантийное и бесплатное сервисное обслуживание изделия в течение всего срока, исчисляемого с даты приобретения прибора.

При обнаружении производственного дефекта в течение гарантийного срока неисправный прибор будет отремонтирован, а в случае невозможности ремонта заменен бесплатно. Гарантийные обязательства действительны только при полностью заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгового предприятия или печати центра технического обслуживания.

## Гарантийные обязательства.

Гарантийное обслуживание не производится при наличии на корпусе прибора следов механического воздействия, вмятин, трещин, сколов и т.п., следов вскрытия корпуса, следов попыток ремонта вне авторизованного центра технического обслуживания, следов попадания влаги внутрь корпуса или воздействия на аппарат агрессивных сред, а также в других случаях нарушения потребителем правил хранения, транспортировки и технической эксплуатации прибора, предусмотренных правилами, изложенными в инструкции по эксплуатации.

.....

Гарантия не распространяется на комплектующие и расходные детали, подверженные износу, а также элементы питания и упаковку прибора.

### **Выписка из «Закона Российской Федерации о защите прав потребителя»:**

«Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащие возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». В этот перечень входят:

«1.... инструменты, приборы и аппаратура медицинские».

## Свидетельство о приемке.

Устройство-соска светодиодная «СВЕТЛЯЧОК-СМ»  
соответствует ТУ 9444-001-64597171-2011  
и признано годным к эксплуатации.

### Представитель ОТК

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

#### Производитель:

ООО «Агама+», Россия,  
111402, г. Москва,  
аллея Жемчуговой, д.5 корп.2,

Рег. удостоверение  
№ ФСР 2011/12591  
от 29.12.2011

## Гарантийный талон.

**Производитель:** ООО «Агама+»,  
Россия, 111402, г. Москва, аллея Жемчуговой, д.5 корп.2

Дата изготовления: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

Штамп ОТК

Дата продажи: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 г.

Продавец: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Печать продавца